



## Как выбрать криодеструктор

Три типа криодеструкторов, осуществляющих:

- прижигание жидким азотом, вытекающим из зонда (Ак-Криомед, Кривоиней);
- замораживание наконечника зонда (Erbo-kryo);
- охлаждение воздушной струей (Криоджет).

**Криодеструктор Кривоиней** - автономный криохирургический аппарат состоит из двух частей: резервуара для жидкого азота (450 мл) и криозонда (два варианта - покороче и подлиннее). Резервуар заполняется азотом из сосуда Дьюара с использованием переливного устройства.

**Криоаппарат портативный CryoPen (с баллончиком-картриджем на 8 г)** - маленький, в виде авторучки аппарат для точечной обработки кожи глубиной до 5 мм, со сменными баллончиками.

В криохирургическом аппарате **Erbo-kryo** используется эффект Джоуля-Томсона - эффект резкого охлаждения находящегося под высоким давлением газа (**закиси азота или углекислоты**) при протекании его через узкое сопло, при этом замораживается сменный наконечник. Газ находится в баллоне и подводится к аппарату гибким шлангом.

**Установки для локальной воздушной криотерапии Криоджет** предназначены для генерации охлажденной до  $-40^{\circ}\text{C}$  ( $-60^{\circ}\text{C}$ ) и осушенной воздушной струи. Установки безрасходные (т.е. без использования жидкого азота или углекислого газа) и позволяют подавать охлажденную воздушную струю по гибкому шлангу на любой локальный участок тела. Используется для криотерапии, но чаще - **для воздушного охлаждения кожи при лазерных, электрохирургических и других видах воздействия**, требующих отвода избыточного тепла, для предупреждения и купирования боли, воспаления, эритемы, отека и других осложнений - без отвода лазерного луча (электродов) от области воздействия и позволяя использовать более высокую плотность потока энергии. Установка работает от бытовой электрической сети 220В/50Гц/16А и не требует постоянного обслуживания и расходных материалов.

**Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ и НДС не облагается.**

---

С глубоким почтением и уважением, директор  
**Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03**

[motoromed@gmail.com](mailto:motoromed@gmail.com)