



Как выбрать алкометр и алкотестер

Алкометр отличается от алкотестера более высокой точностью, надежностью и выносливостью. Количество тестов в день - от 150 и выше - без подзарядки батарей. И у него есть удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также сертификат о внесении в Реестр типа средств измерений (СИ) Госстандарта РФ. То есть, официально показания алкометра имеют юридическую силу и Вы сможете использовать распечатанное показание алкометра в суде. Также важно, что все эти удостоверения даны алкометру заслуженно - его не обманешь и не испортишь из-за перегрузки и длительного использования.

Самые популярные приборы: алкотестер AL-7000, алкотестер AL-6000, алкотестер Drivesafe, алкометр Draeger 6810 (6510), AL-1100.

Для какого количества человек делаете выбор алкотестера (алкометра)



Личное использование, 1-2 раза в день: Качество сенсора (датчика) - нужно ждать 20 минут после употребления спиртного, чтобы не износить сенсор.

Выбор персонального алкотестера.

Для группы, примерно 50 измерений в день: 1) Особенности датчика - Нужно ждать иногда до 20 минут. 2) Есть удостоверение Минздравсоцразвития России.

Выбор специальный алкотестера.

Для большой группы, до 300 измерений в день: 1) Сенсор позволяет не ждать после предыдущего измерения, работоспособен почти сразу. 2) Есть удостоверение Минздравсоцразвития России и сертификат о внесении в Реестр типа средств измерений (СИ) Госстандарта РФ.

Профессиональный алкометр.

Поможет ли алкотестер (алкометр) в спорах с ГАИ



Алкотестер не позволяет "поспорить" с ГАИ.

Алкотестер мнимальный по стоимости для того, чтобы не сдать ГАИ и не повестись на их доводы, - это **AL1100**

Алкометр позволяет привести показания для доказательства ГАИ и юридического доказательства: есть удостоверение Минздравсоцразвития России и сертификат о внесении в Реестр типа средств измерений (СИ) Госстандарта РФ.

С мундштуком или без? Или все вместе? Какие есть дополнительные аксессуары?



Тест делается алкотестером с мундштуком. Более точно.

Алкотестеры **AL6000, AL7000, AT2000, DA5000, DA7000, DA8000**

Алкотестер тестирует без мундштука. Больше погрешность.

Алкотестер **Elan, AL2000, AL2500, AL5000, Tanita HC207, Bactrack, AD 126**

Тест с мундштуком. Более точно. У алкотестера есть разрешение Минздрава России для применения в медицинской практике и позволяет официально применять прибор при предрейсовом осмотре водителей.

Алкотестер **Drivesafe, Ensure**

Алкотестер тестирует независимо от наличия мундштука. Больше погрешность

"Алкотестер ГИБДД" **AL1100**

Тестируют свободным выдохом и через мундштук. К алкометру прилагается кейс и **принтер в комплекте.**

Алкометр **Alert J4Хec, Draeger 6810 АКПЭ**

Тестируют свободным выдохом и через мундштук. Кейс и принтер отдельно покупается.

Алкометр **Alert J4Хec Draeger 6510 АКПЭ**

Как часто делается перенастройка (калибровка прибора)



Требуется регулярная калибровка датчика в сервисном центре. Все персональные алкотестеры, **кроме Dingo Pro, AL 7000**

Можно заменить датчик самому, купив новый. Это дороже, чем калибровка.

Алкотестер **Dingo Pro, AL 7000**

Требуется регулярная калибровка датчика в сервисном центре. Все специальные алкотестеры.

Требуется регулярная калибровка датчика в сервисном центре раз в год всех моделей алкометров.

Диапазон цен



Цена персональных и специальных алкотестеров до 10 т. р.

Цена алкометров от 20 т. р. до 60 т. р.

Как тестировать прибор



Проверку алкотестеров следует делать осторожно, следуя инструкции! Тест алкотестеров требуется проводить не ранее, чем через 20 мин. после выпитого (если квас или глоток обычного пива - можно раньше). Иначе вы перегрузите и испортите датчик.

Проверку алкотестеров можно проводить при любом количестве выпитого и без ожидания 20 минут.

Таблица содержания алкоголя в крови: время расщепления

— время расщепления алкоголя в крови у мужчин.

— время расщепления алкоголя в крови у женщин.

Напиток (объём емкости)	Кол-во кружек/бокалов/рюмок									
	1		2		3		4		5	
Пиво (0,5 л)	2 ч	6 ч	5 ч	12 ч	7 ч	18 ч	9 ч	24 ч	12 ч	30 ч
Вино (200 мл)	3 ч	7 ч	6 ч	14 ч	8 ч	21 ч	11 ч	29 ч	14 ч	36 ч
Шампанское (200 мл)	2 ч	4 ч	3 ч	8 ч	5 ч	13 ч	7 ч	17 ч	8 ч	22 ч
Коньяк (50 мл)	2 ч	5 ч	4 ч	10 ч	6 ч	13 ч	8 ч	21 ч	10 ч	26 ч
Водка (100 мл)	4 ч	10 ч	7 ч	19 ч	11 ч	29 ч	15 ч	29 ч	19 ч	38 ч

Учтите, что абсолютно точными эти данные быть не могут!

Всё зависит от организма человека.

С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03

motoromed@gmail.com