



# ПРИБОРЫ ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ, ВАКУУМНОГО ЛИМФОДРЕНАЖА, ПРЕССОТЕРАПИИ производства “Starvac Group“ (Франция)

## АППАРАТ “СТАРВАК”

Предлагаем три модели аппарата Starvac  
(все они имеют Регистрационное удостоверение и Сертификат соответствия):

1. Базовая модель Starvac SP Original
2. Модель бизнес-класса, новинка аппарат Starvac DxSmart
3. Модель Премиум-класса Starvac DxTwin

### Особенности аппарата Starvac SP Original:

Усовершенствованные технологии Starvac DxSmart (более подробно в презентации модели Starvac DxTwin) - отличия от модели SP Original:

- роликовая насадка Evo3D создает двойную кожную складку, что позволяет одновременно прорабатывать кожу и подкожно-жировую клетчатку на разной глубине,
- насадки с внутренним встроенным вращающимся элементом EvoSphere специально разработаны для лечения фиброзных форм целлюлита.
- баночные насадки NeoCup специально применяются для проведения динамического баночного массажа, а также рефлексотерапии.
- с помощью насадок Neolift специалист проводит тонизацию кожи, лимфодренаж и проработку морщин на лице.
- более широкий спектр возможностей:  
разнообразные программы по коррекции фигуры, применение в эстетической медицине для коррекции шрамов, рубцов и растяжек, терапевтическое применение, программы для спортивной медицины и реабилитации после родов, рефлексотерапевтический массаж и СПА-программы.





**Starvac SP Original** - единственный аппарат, сочетающий в себе высокую эффективность и французское качество, но при этом находящийся в бюджетной категории, лучшее соотношение цены и качества.

### Принцип работы аппаратов

Аппарат создает контролируемое разрежение на поверхности кожи.

Используя **ролики** - кожная складка втягивается между двумя роликами. Расстояние между этими складками меняется, адаптируясь к толщине кожной складки. Во время продвижения насадки, кожная складка прокатывается между двумя валиками и возникает уникальное воздействие массаж + прокатывание + вакуум. Две уплотнительные грани, расположенные впереди и сзади роликов, усиливают дренажный эффект на лимфатическую систему, в то же время добавочные ролики с обеих сторон насадки облегчают ее продвижение. Такой же эффект достигается при использовании **банок**.

Специально разработанный дизайн насадки, защищенный международным патентом, дает возможность проводить мощный массаж при малых энергозатратах.

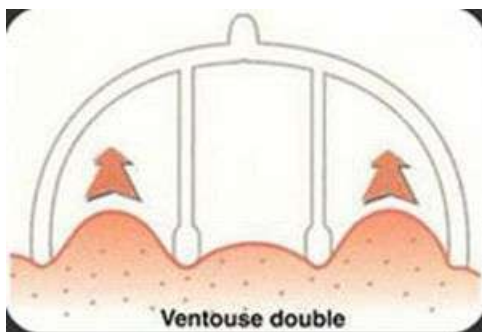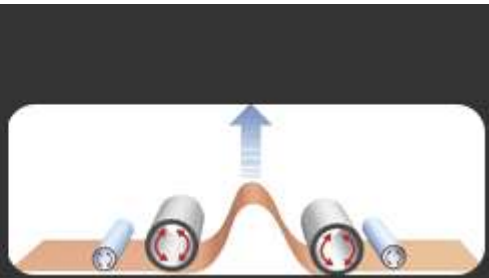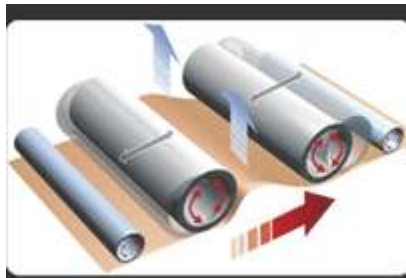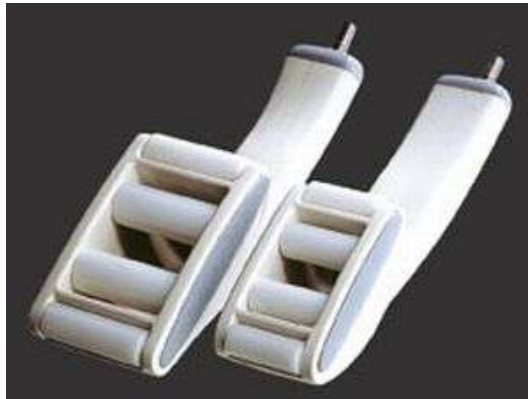

### Starvac - коррекция фигуры:

- обладает всеми положительными эффектами мануального массажа
- повышает тонус кожи
- стимулирует лимфоток и кровообращение
- моделирует контуры фигуры
- ускоряет выведение токсинов

- усиливает липолиз
- ускоряет обновление кожи
- оказывает выраженное антистрессовое действие
- дренажный эффект усиливает мышечную активность

#### **Starvac технология:**

- это лечение целлюлита путем воздействия, в первую очередь, на соединительную ткань. Ключевыми моментами являются лимфодренаж, реваскуляризация и воздействие на рефлексогенные зоны. Эффекты от лечения целлюлита: оптимизация метаболизма и создание устойчивой гиперемии, устранение спазмов при миалгиях, дермалгиях.

#### **Уход за телом и лицом:**

целлюлит  
 лимфатический дренаж  
 релаксирующий массаж  
 "тяжёлые ноги"  
 разглаживание морщин

#### **Терапевтическое применение:**

ревматология  
 травматология  
 спорт  
 рефлексотерапия

#### **Показания к применению:**

целлюлит и локальные жировые отложения  
 дисциркуляторные нарушения  
 миалгии, дермалгии  
 рубцы и стрии  
 заболевания волос  
 подготовка к пластическим операциям и реабилитация после них (например, липоксация)  
 омоложение кожи

#### **Области применения:**

Косметология, дерматология, травматология, лимфология, флебология, неврология, спортивная медицина, ревматология

#### **Терапевтический эффект вакуумной терапии.**

#### **Для кожи:**

- 1) подтягивает
- 2) восстанавливает упругость
- 3) стимулирует кровообращение
- 4) омолаживает
- 5) тонизирует
- 6) питает
- 7) рассасывает рубцовые ткани и стрии

#### **Для мышечной ткани:**

- 1) · энергичный массаж
- 2) · эффективен после физических нагрузок
- 3) · способствует снятию усталости и боли
- 4) · снимает мышечные спазмы
- 5) · стимулирует кровообращение

#### **Общие воздействия:**

- Выводит токсины
- Эффективен при лечении целлюлита
- Снимает отеки

- Ускоряет рассасывание гематом
- Стимулирует лимфоток
- Улучшает и укрепляет контуры тела.

### Терапевтический эффект вакуумной терапии

Для кожи:	Для мышечной ткани:	Общие воздействия:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтягивает.</li> <li>• Восстанавливает упругость.</li> <li>• Тонизирует.</li> <li>• Омолаживает.</li> <li>• Стимулирует кровообращение.</li> <li>• Питает.</li> <li>• Рассасывает рубцовые ткани и стрии.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Энергичный массаж.</li> <li>• Эффективен после физических нагрузок.</li> <li>• Способствует снятию усталости и боли.</li> <li>• Снимает мышечные спазмы.</li> <li>• Стимулирует кровообращение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выводит токсины.</li> <li>• Эффективен при лечении целлюлита (до 3 стадии).</li> <li>• Снимает отеки.</li> <li>• Ускоряет рассасывание гематом.</li> <li>• Стимулирует лимфоток.</li> <li>• Улучшает и укрепляет контуры тела.</li> </ul>

Основные преимущества аппарата "Starvac SP"	Основные технические параметры		
	Диапазон регулирования:	Габаритные размеры:	
Высокое качество процедур, невысокая стоимость, большой выбор программ, широкий спектр терапевтических воздействий, удобство в работе, многообразие насадок и простота их обработки, минимум расходных материалов, большой выбор протоколов, быстрая окупаемость, современный дизайн, портативность и малый вес.	Вакуума – 80-800 мл Бар. Питание – 220 В 50-60 Гц.	Вес – 6 кг	Высота – 104 см
		Длина – 41 см	Ширина – 47,5 см

### Как работать на приборе Starvac:

Starvac - аппарат для вакуумного массажа, который создает вакуум на поверхности кожи и всасывание кожной складки. В этом аппарате используют специальную 4-х роликовую насадку. Два ролика расположенные внутри приспособляются к поверхности кожи. Когда происходит движение насадкой, кожная складка прокручивается и массируется 2-мя внутренними роликами насадки, создавая уникальное действие " массаж - всасывание - прокручивание". Два наружных ролика создают дополнительный вакуумный лимфодренаж и обеспечивают скольжение насадки. Специальная конструкция (Международный патент) сделала возможным производство мощного, надежного аппарата, удобного в применении. Эта система позволяет создавать постоянный и импульсный вакуум с регулировкой максимального и минимального значения.

### Starvac и уход за телом

- Дает все преимущества ручных методов массажа;
- Повышает тонус кожи;
- Стимулирует крово- и лимфообращение;
- Помогает в формировании контуров тела;
- Выводит токсины;
- Расслабляет и омолаживает.

### Starvac и спорт

- Проводит дренаж и стимуляция мышц после физической нагрузки;
- Ускоряет рекуперацию, уменьшает боли;
- Релаксирует.

Starvac технология

Благодаря его действию на соединительную ткань, Starvac успешно лечит:

- Тканевые депозиты и целлюлит, создавая реваскуляризацию адипоцитов;
- Помогает улучшить кровообращение, улучшая метаболизм, вследствие создания существенной гиперемии кожи;
- Помогает при лечении гиперестезии, благодаря уменьшению спазмов, мышечных контрактур.

### **АКСЕССУАРЫ для расширения диапазона применения.**

Различные формы вакуум - чашек используют в ручном и автоматическом режиме.

Автоматический режим.

Чтобы использовать Starvac в автоматическом режиме используют синие чашечные насадки без отверстий. На одном соединительном шланге может использоваться одновременно до 4-х вакуумных чашек.

### **Ручной режим.**

Каждая прозрачная всасывающая чашка имеет отверстие сверху, которое блокируется указательным пальцем для того, чтобы произвести всасывание или изменить вакуумный уровень

## **Основные методы вакуумной терапии:**

### **1. Вакуумно-роликовый массаж.**

Проводится при помощи головок двух типоразмеров в режимах постоянного или пульсирующего вакуума. Метод используется в основном для уменьшения проявлений целлюлита, удаления излишков жировых отложений, зонального моделирования фигуры, рассасывания отеков, лифтинге и т.д.

Направление движения головки определяется универсальными схемами, принятыми для вакуумной терапии. Величина вакуума и типоразмер головки определяется индивидуально в зависимости от показаний и индивидуальных характеристик клиента.

### **2. Баночный динамический массаж.**

Проводится при помощи чашек четырех типоразмеров в режиме постоянного или пульсирующего вакуума. Чашки используются для помпажа лимфатических узлов, зональной обработки участков, на которых затруднено использование роликовых головок (живот, предплечья).

### **3. Баночный точечный массаж.**

Проводится при помощи четырех чашек двойного всасывания. С помощью Т-коннектора чашки объединяются в схему для одновременного использования. Процедура используется для разогрева определенных зон методом "втягивание-разминание", дробления жировых клеток, предварительной обработки зон выраженного целлюлита перед наложением масок.

### **4. Вакуумный лифтинг лица.**

Проводится при помощи трех насадок. Процедура лифтинга лица проводится в четыре этапа: помпаж, лимфодренаж, активация, формирование. На каждом этапе используется специальная насадка и режим вакуума, в зависимости от состояния кожи клиента. Метод используется для восстановления тургора кожи, разглаживания рубцов и морщин, рассасывания отеков, укрепления контуров лица и т.д.

## **Аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом и лимфодренажа STARVAC SP Original (STARVAC GROUP, Франция)**

Комплектация:

Системный блок на консоль тележке – 1 шт.

Сетевой кабель – 1 шт.

Соединительный шланг для прозрачных чашек и

роликов – 1 шт.  
Соединительный шланг для синих чашек – 1 шт.  
Двойные синие чашки – 4 шт.  
Чашки прозрачные разного размера – 4 шт.  
Ролики – 2 шт. (большой – 1 шт., маленький – 1 шт.)  
Насадки для лица – 3 шт.  
Запасной фильтр – 1 шт.  
Полки для аксессуаров — 2 шт.  
Держатель для шланга — 1 шт.

**Starvac DXSmart** – новинка от компании STARVAC, прибор для вакуумной терапии и лимфодренажа с уникальными манипулами EVOsphere, EVO3D, NEOcup, NEOlift и системой PILOT, футуристическим дизайном

Комплектация:

Корпус с консоль тележкой - 1шт.  
Сенсорный экран - 1 шт.  
Пульт управления Pilot-1 шт.  
Головка роликовая для тела EVO3D - 1 шт.  
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø40 — 1 шт.  
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø60-1 шт.  
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø80 — 1шт.  
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø8 — 1шт.  
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø18 - 1шт.  
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø14x24 — 1шт.  
Насадка для тела EVOsphere -2 шт.  
Фильтр поролоновый - 2 шт.  
Сетевой кабель - 1шт.  
Брошюра – протокол проведения процедур

**Starvac DXtwin** – прибор последнего поколения от компании STARVAC (Франция), для вакуумной терапии и лимфодренажа с уникальными манипулами EVOsphere, EVO3D, NEOcup, NEOlift и системой PILOT

Комплектация:

Корпус – 1 шт.  
Сенсорный экран - 1 шт.  
Пульт управления Pilot - 1 шт.  
Головка роликовая для тела EVO3D - 1 шт.  
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø40 — 1 шт.  
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø60-1 шт.  
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø80 — 1шт.  
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø8 — 1шт.  
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø18 - 1шт.  
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø14x24 — 1шт.  
Насадка для тела EVOsphere - 2 шт.  
Фильтр поролоновый - 2 шт.  
Сетевой кабель - 1шт.  
Протокол проведения процедуры - брошюра - 1шт.

**Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ,  
НДС не облагается.**

**С глубоким почтением и уважением, директор  
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03**

[motoromed@gmail.com](mailto:motoromed@gmail.com)